

MYCOPLASMA CONTROL

réf. IM00900



- ◆ 6 souches *Ureaplasma urealyticum* et *Mycoplasma hominis* caractérisées (12 tests réalisables)
- ◆ Péréemption longue / Facilité d'utilisation
- ◆ Un accompagnement dans vos démarches Qualité (répond aux exigences de la norme ISO 15189)
- ◆ Un rendu de résultats conforme aux CMI de référence (Concentration Minimale Inhibitrice) en milieu liquide
- ◆ Identification des souches réalisée sur milieux U9 et Hayflic
- ◆ Utilisation validée avec MYCOFAST® EvolutionN 2, MYCOFAST® EvolutionN 3, MYCOFAST® RevolutioN et les principaux autres dispositifs du marché

PROTOCOLE SIMPLE

- 1 reconstituer la souche par 1mL d'eau distillée stérile
- 2 Diluer la suspension bactérienne dans le milieu de transport ou de suspension
- 3 régénérer le milieu de culture si nécessaire
- 4 Ensemencer la galerie ou la microplaque

Nous vous invitons à lire attentivement les instructions sur l'étiquetage ou dans la notice d'utilisation



: ELITech Microbio (France)

