




# Microbiologie

# GAMME ELI.H.A

## Sérodiagnostic

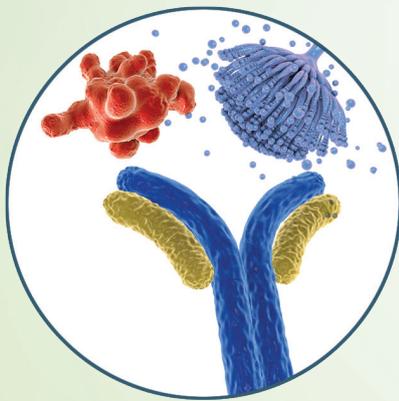

## LA GAMME ELI.H.A: HÉMAGGLUTINATION INDIRECTE (H.A.I.)

*Kits complets avec réactifs liquides prêts à l'emploi  
Résultats en 2 heures et fiables du jour au lendemain*


### Mycologie

- ◆ Candidose
- ◆ Aspergillose

### Parasitologie

- ◆ Bilharziose (Schistosomiase)
- ◆ Amibiase
- ◆ Hydatidose (Échinococcose)
- ◆ Distomatose
- ◆ Toxoplasmose

# Gamme ELI.H.A

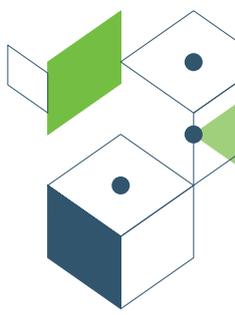

## ► PRINCIPE

### ◆ LA GAMME ELI.H.A EST BASÉE SUR LE PRINCIPE DE L'HÉMAGGLUTINATION INDIRECTE

Les hématies de mouton sensibilisées sont recouvertes d'antigènes et ajoutées au sérum à tester. Si les anticorps spécifiques sont présents dans le sérum, ils s'agglutinent avec les hématies et un dépôt rouge/brun apparaît au fond du puits. Avec un sérum non réactif, il n'y a pas d'agglutination avec les cellules sensibilisées et celles-ci tombent au fond du puits, formant un bouton compact.


Exemple: Sérum positif à la dilution 1:640



## ► MÉTHODOLOGIE

### ◆ UN SEUL PROTOCOLE POUR TOUS LES KITS

1. Première dilution du sérum
2. Préparation de la microplaque
3. Dilutions en cascade du sérum & préparation du puit "témoin sérum"
4. Addition des **hématies sensibilisées et des hématies non sensibilisées**
5. Homogénéiser soigneusement et & laisser la plaque immobile pendant 2 heures avant de lire les résultats.

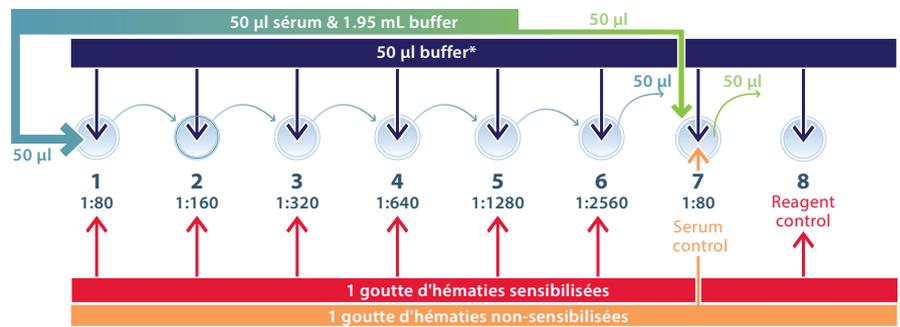

\*L'IgM anti-Toxoplasma gondii peut être détectée en ajoutant du 2-mercaptoéthanol (non fourni) au tampon.

## ► AVANTAGES

- ◆ Longue conservation (> 12 mois)
- ◆ Protocole simple
- ◆ Efficient
- ◆ Absence d'instruments
- ◆ Résultats en unités internationales pour ELI.H.A Toxo

## ► PRODUCT RANGE

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIAGNOSTIC	QUANTITÉ	SENSIBILITÉ	SPÉCIFICITÉ
Mycologie	44600	<b>ELI.H.A Candida</b>	Candidose	120 Tests	85.4%	97.9%
	44602	<b>ELI.H.A Aspergillus</b>	Aspergillose	102 Tests	80%	98%
	66600	<b>ELI.H.A Schistosoma</b>	Bilharziose	120 Tests	85.7%	98.2%
Parasitologie	66602	<b>ELI.H.A Amoeba</b>	Amibiase*	120 Tests	93%	97%
	66604	<b>ELI.H.A Echinococcus</b>	Hydatidose	102 Tests	93%	94.9%
	66606	<b>ELI.H.A Distoma</b>	Distomiase	102 Tests	96.1%	96.6%
	66610	<b>ELI.H.A Toxo</b>	Toxoplasmose	120 Tests	99.2%	97.7%

\* Diagnostic rapide de l'amibiase également disponible dans notre gamme de produits au latex : **ELITex Bicolor Amoeba** (Ref. 66608)



### NOUS CONTACTER

#### ELITech Microbio

19 allée d'Athènes  
83870 Signes

Tél. : +33 4 83 36 10 82  
Fax : +33 4 83 36 10 81



ELITech Microbio (France)

Produit(s) destiné(s) aux professionnels de santé. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur les étiquetages ou dans les notices d'utilisation des produits.



[www.elitechgroup.com](http://www.elitechgroup.com)  
[em-marketing@elitechgroup.com](mailto:em-marketing@elitechgroup.com)