

120 Pruebas
(Ref. 44600)

Para uso en diagnóstico *in vitro*, sólo para uso profesional.
Pruebas de un solo uso.



Con cada kit se pueden realizar 120 pruebas o 20 reacciones con 6 diluciones.

Candida albicans es el hongo más comúnmente aislado y también el más patógeno. El diagnóstico inmunológico mediante la detección de anticuerpos es de gran importancia en caso de sospecha de infección invasiva, visceral o septicémica por *Candida*, si el hongo no puede aislarse directamente de una muestra clínica.

El manejo es sencillo y rápido, los resultados se obtienen en 2 horas.

Descripción	Cantidad
R1: Tubo con 2,4 mL de glóbulos rojos sensibilizados	1
R2: Tubo con 1,0 mL de glóbulos rojos no sensibilizados	1
R3: Vial que contiene 55 mL de solución tampón de fosfato; pH 7.2	1
R3: Tubo con 2,0 mL de adsorbente	1
CONTROL +: Tubo con 0,2 mL de control positivo titulado	1
CONTROL -: Tubo con 0,2 mL de control negativo	1
MICROPLACA: Placa de microtitulación (en forma de U)	2
DROPPER: Cuentagotas especial	2

- Al dosificar los reactivos **R1** y **R2**, asegúrese de que el gotero esté exactamente en posición vertical. Asegúrese de que no haya burbujas de aire en las gotas para garantizar un volumen de descarga constante.

No realice ningún tratamiento térmico previo (descomposición) del suero.

- 1- J. PARIS, A. CAPRON, A. VERNES, J.-C. PARIS, S. ANDRIEU - Apport de l'immunologie à l'étude des candidoses digestives - *Arch. Taxa* -2014. *Appt. Dig.*, 1973, 62, 309-313.
- 2- P. WATTRE, J.-C. DUGIMONT, A. CAPRON - Progrès récents dans le diagnostic immunologique des candidoses humaines - *Bull. SOC. Myc. Méd.*, 1975, IV, n° 2, 155-158.
- 3- H. ZOUAGHI, M. GAUTHIER - Diagnostic immunologique des candidoses - *Feuil. Biol.*, 1980, XXI, 112,59-65.
- 4- P. WATTRE, A. DEWILDE, D. Duriez - Diagnostic immunologique des candidoses ; étude critique à propos de 123 observations. Perspectives d'avenir - *Méd.* -2014. *Inf.*, 1984, 14 (5), 308-313.
- 5- P. CANTON, B. DUPONT, T. MAY - Novedades de los sistemas de candidatos - *Méd.* -2014. *Inf.*, 1984, 14 (11), 582-588.

