



Microbiologie

AGGLUTINATION SUR LAME



LARGE GAMME DE TESTS

Pour un diagnostic rapide, facile et précis.

Mycologie

- ◆ *Candida dubliniensis*
- ◆ *Candida albicans* + *dubliniensis*
- ◆ *Candida krusei*

Amibiase

Staphylocoque

Facteur Rhumatoïde

Mononucléose

Streptocoque A

AGGLUTINATION SUR LAME

► PRINCIPE

Les tests d'agglutination assurent un diagnostic spécifique par le principe d'agglutination :

- ◆ de particules de latex (gamme ELITex) sensibilisées :

Mycologie

- ELITex Bicolor albi-dubli
- ELITex Bicolor *dubliniensis*
- ELITex *krusei*

Amibiase

- ELITex Bicolor Amoeba

Staphylocoque

- ELITex Staph

Facteur Rhumatoïde

- ELITex Bicolor RF

Mononucléose

- ELITex Bicolor Mono

- ◆ d'hématies de mouton sensibilisées :

Facteur Rhumatoïde

- WAALER Rose Bicolor

Streptocoque A

- STREPTO Color

La présence de pathogènes ou d'anticorps se caractérise par une agglutination des particules.

Pour les 7 tests bicolores (STREPTO Color inclus) ces agglutinats sont d'une couleur différente de celle de l'arrière-plan.

En l'absence de pathogène ou d'anticorps, la suspension reste homogène et de couleur uniforme.


► MÉTHODOLOGIE

- 1 Ajouter 1 goutte de réactif.

- 2 Mycologie et staphylocoque A.
Ajouter 3 - 4 colonies.

- 2 Amibiase, mononucléose, facteur rhumatoïde, streptocoque A.
Ajouter 1 goutte de sérum (ou plasma pour STREPTO Color).

- 3 Mélanger et appliquer un mouvement de rotation à la lame pour lire les résultats.

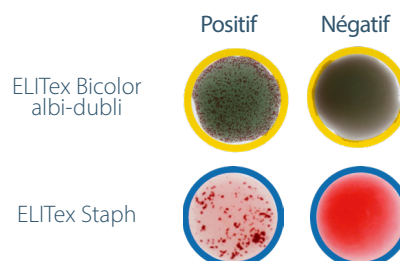

► AVANTAGES

- ◆ Kits complets avec réactifs prêts à l'emploi
- ◆ Longue conservation de 15 à 24 mois
- ◆ Test économique et performant
- ◆ Lecture visuelle colorimétrique
- ◆ Protocole simple

► RÉFÉRENCES

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	RESULTATS	SENSITIVITÉ	SPÉCIFICITÉ
Mycologie	44500	ELITex Bicolor albi dubli	60 Tests	5 min	99.8%	99.4%
	44502	ELITex Bicolor dubliniensis	100 Tests	3 -5 min	98%	100%
	44504	ELITex krusei	30 Tests	5 min	98.8%	100%
Staphylocoque	22711 / 22712	ELITex Staph	60 / 160 Tests	1 min	99.02%	99.07%
Streptocoque A	04145	STREPTO Color	50 Tests	2 min	>95%	>95%
Amibiase	66608	ELITex Bicolor Amoeba*	25 Tests	5 min	98%	96%
Facteur Rhumatoïde	04165 / 04166	ELITex Bicolor RF	50 / 100 tests	2 min	98.75%	98.37%
	04175 / 04176	WAALER-Rose Bicolor	50 / 100 tests	2 min	98.79%	98.79%
Mononucléose	04155 / 04156	ELITex Bicolor Mono	50 / 100 Tests	2 min	98.4%	99.7%

* Détermination quantitative de l'amibiase également disponible dans notre gamme de produits d'hémagglutination indirecte : ELI.H.A Amoeba (Ref. 66602)



NOUS CONTACTER

ELITech Microbio

19 allée d'Athènes
83870 Signes

Tél. : +33 4 83 36 10 82
Fax : +33 4 83 36 10 81



ELITech Microbio (France)

Produit(s) destiné(s) aux professionnels de santé. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur les étiquettes ou dans les notices d'utilisation des produits.



www.elitechgroup.com
em-marketing@elitechgroup.com