

Tableau d'interprétation ELI ATB BOVINE selon le CLSI VET-S2 2013

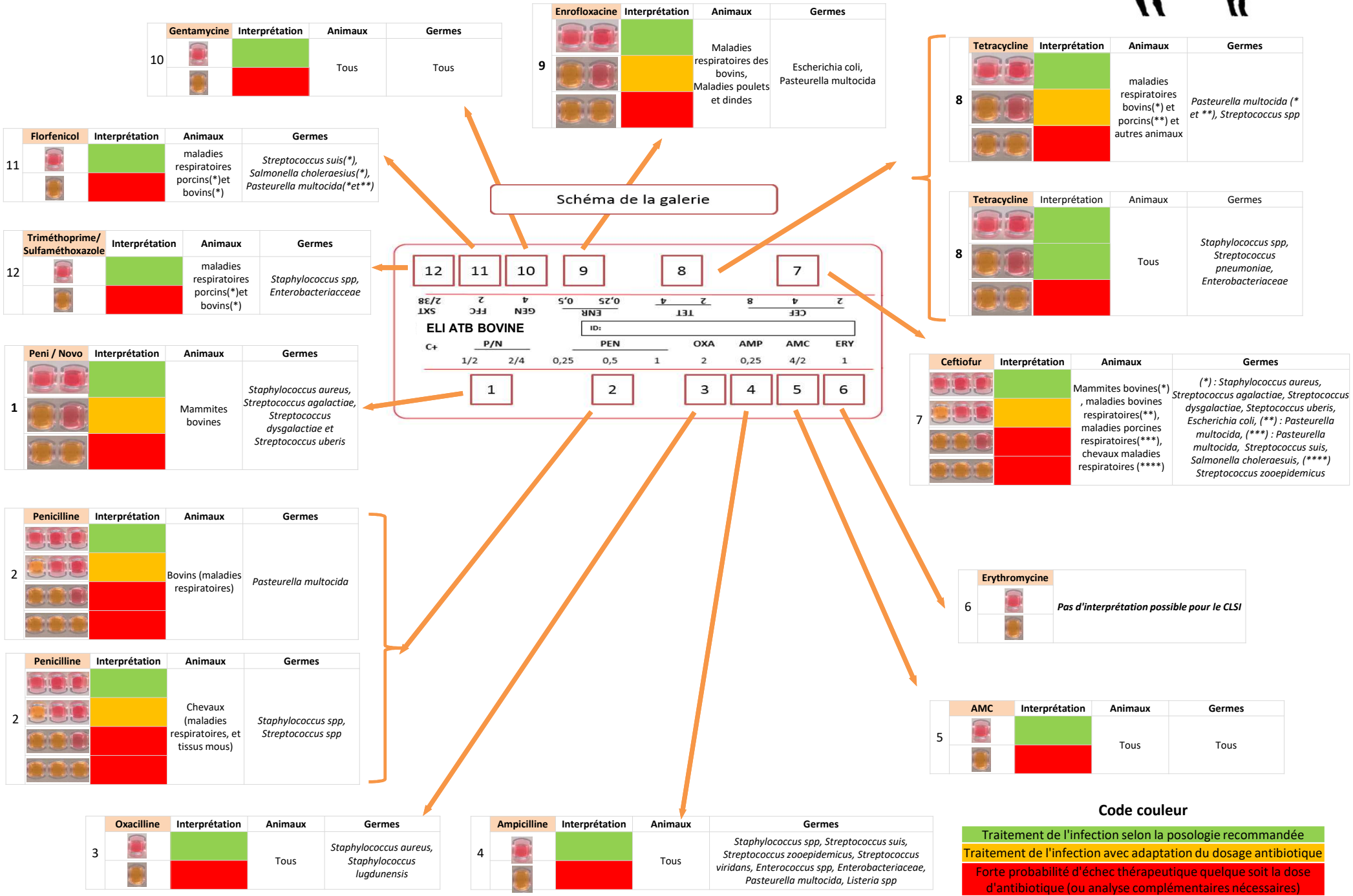
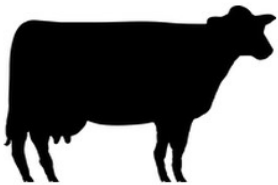


Tableau d'interprétation ELI ATB BOVINE selon le CASFM-EUCAST_2014 vétérinaire


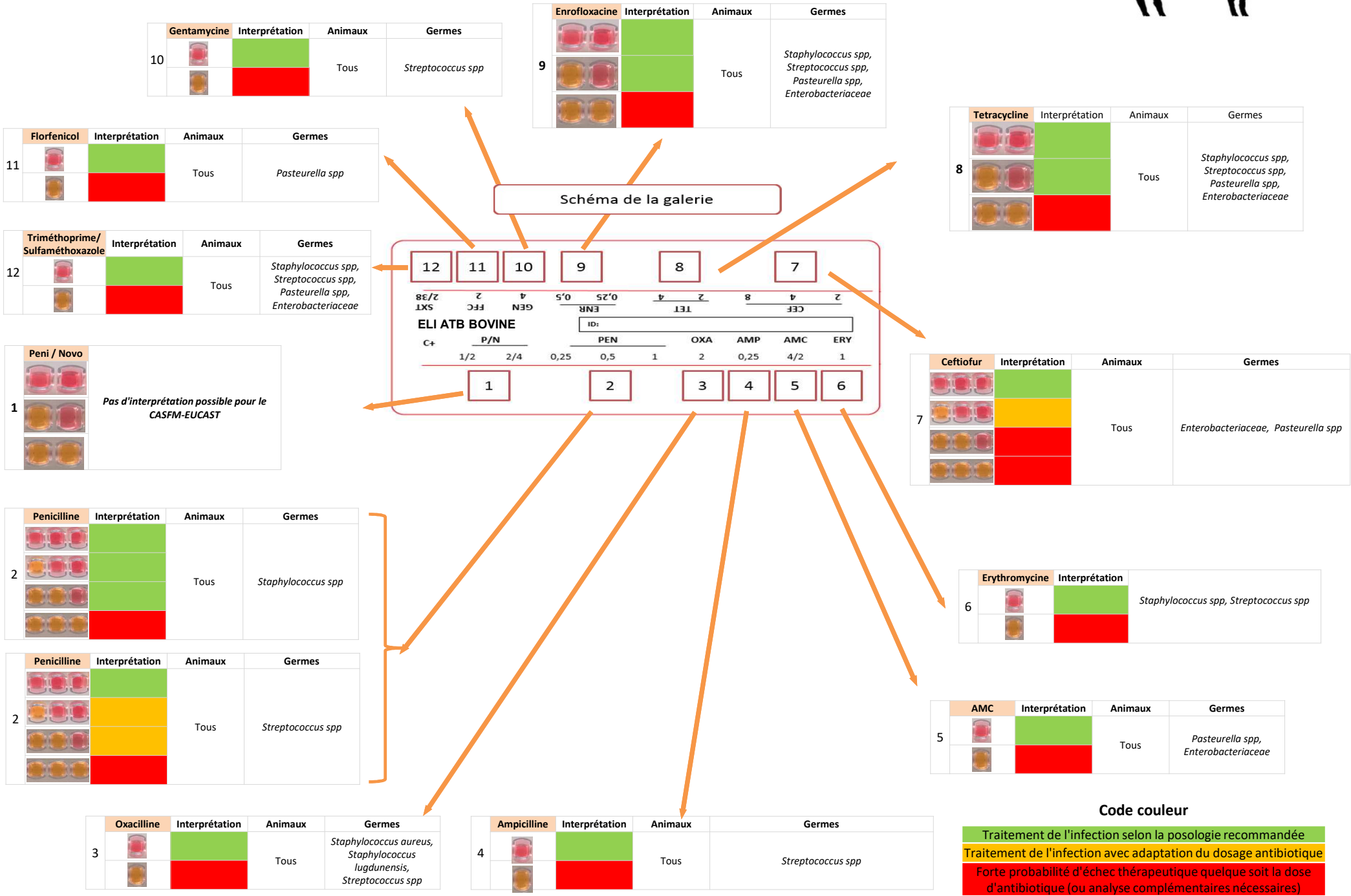


Tableau d'interprétation ELI ATB PETS selon le CLSI VET-S2 2013

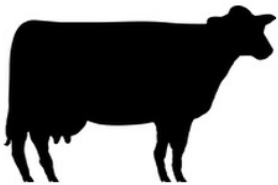

Enrofloxacin	Interprétation	Animaux	Germes
	Green	*Chat (peau et tissus mous), **Chien (peau, tissus mous, maladies respiratoires, infections du tractus urinaire)	*Tous les germes, **Staphylococcus spp, Enterobacteriaceae
	Yellow		
	Yellow		
	Red		

Marbofloxacin	Interprétation	Animaux	Germes
	Green	Chat	Tous
	Yellow		
	Red		

Gentamycin	Interprétation	Animaux	Germes
	Green	Tous	Tous
	Red		

Triméthoprim/Sulfaméthoxazole	Interprétation	Animaux	Germes
	Green	Tous	Staphylococcus spp, Enterobacteriaceae
	Red		

Tetracycline	Interprétation	Animaux	Germes
	Green	Tous	Staphylococcus spp, Enterobacteriaceae, Streptococcus pneumoniae
	Yellow		
	Red		

Tetracycline	Interprétation	Animaux	Germes
	Green	Tous	Streptococcus spp, (sauf streptococcus pneumoniae)
	Yellow		
	Red		

Clindamycin	Interprétation	Animaux	Germes
	Green	Tous	Tous
	Red		


Penicilline	Interprétation	Animaux	Germes
	Green	Tous	Staphylococcus spp, Streptococcus viridans, Streptococcus bêta hemolytique, Enterococcus spp, Listeria spp
	Green		
	Red		
	Red		

AMC	Interprétation	Animaux	Germes
	Green	Tous (sauf chat et chien)	Tous
	Red		

Ampicilline	Interprétation	Animaux	Germes
	Green	Tous	Staphylococcus spp, Streptococcus canis, Streptococcus viridans, Streptococcus bêta hemolytique, Enterococcus spp, Enterobacteriaceae, Listeria spp
	Red		

Oxacilline	Interprétation	Animaux	Germes
	Green	Tous	Staphylococcus aureus, Staphylococcus lugdunensis
	Red		
	Red		

Erythromycin	Interprétation	Animaux	Germes
	Green	Tous	Staphylococcus spp, Enterococcus spp
	Red		
	Red		

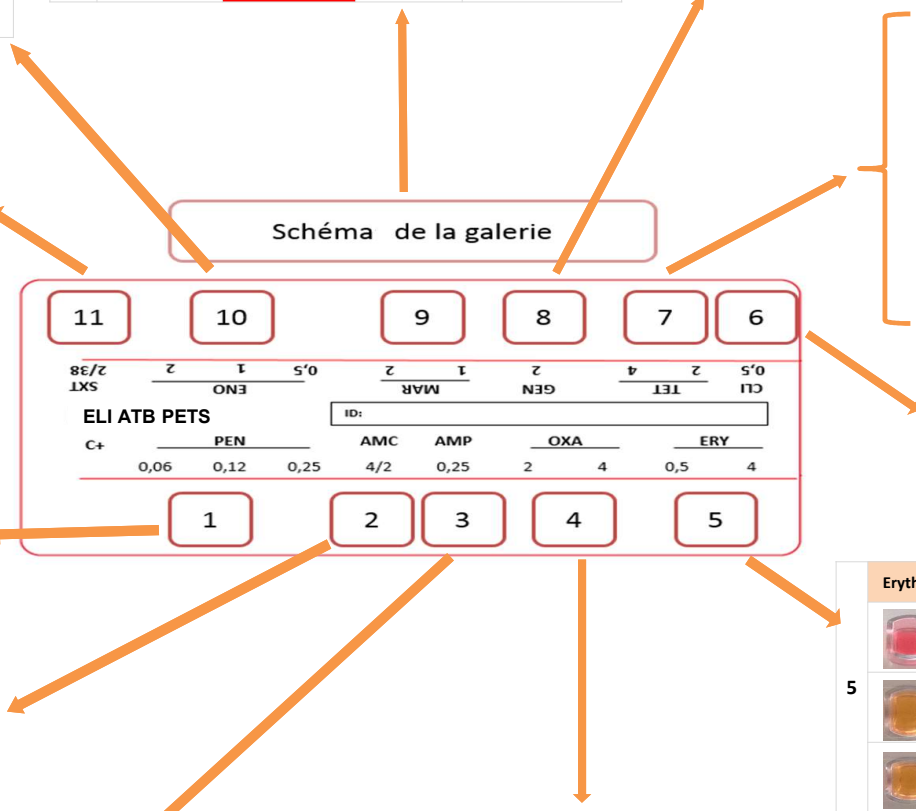

Code couleur

- Traitement de l'infection selon la posologie recommandée
- Traitement de l'infection avec adaptation du dosage antibiotique
- Forte probabilité d'échec thérapeutique quelque soit la dose d'antibiotique (ou analyse complémentaires nécessaires)

Tableau d'interprétation ELI ATB PETS selon le CASFM-EUCAST_2014 vétérinaire




Enrofloxacin	Interprétation	Animaux	Germes
	Vert	Tous	<i>Staphylococcus spp.</i> , <i>Streptococcus spp.</i> , <i>Enterobacteriaceae</i> , <i>Pasteurella multocida</i>
	Jaune		
	Jaune		
	Rouge		

Marbofloxacin	Interprétation	Animaux	Germes
	Vert	Tous	<i>Staphylococcus spp.</i> , <i>Streptococcus spp.</i> , <i>Enterobacteriaceae</i> , <i>Pasteurella multocida</i>
	Jaune		
	Rouge		

Gentamycine	Interprétation	Animaux	Germes
	Vert	Tous	<i>Streptococcus spp.</i> , <i>Enterobacteriaceae</i>
	Rouge		

Tetracycline	Interprétation	Animaux	Germes
	Vert	Tous	<i>Staphylococcus spp.</i> , <i>Streptococcus spp.</i> , <i>Pasteurella spp.</i> , <i>Enterobacteriaceae</i>
	Jaune		
	Rouge		

Triméthoprim/ Sulfaméthoxazole	Interprétation	Animaux	Germes
	Vert	Tous	<i>Staphylococcus spp.</i> , <i>Streptococcus spp.</i> , <i>Enterobacteriaceae</i> , <i>Pasteurella multocida</i>
	Rouge		

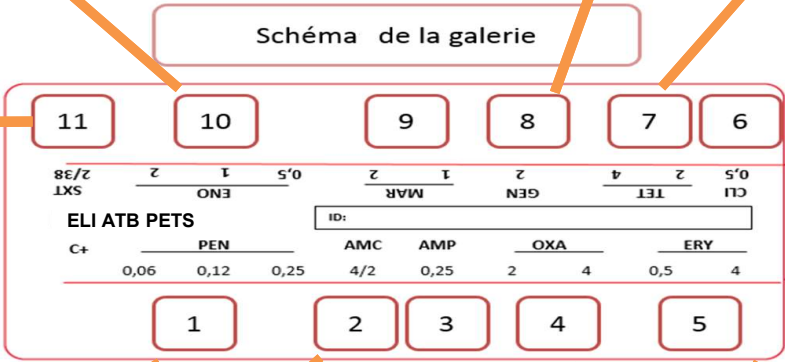

Clindamycine	Interprétation	Animaux	Germes
	Vert	Pas d'interprétation possible pour le CASFM-EUCAST	
	Rouge		

Penicilline	Interprétation	Animaux	Germes
	Vert	Tous	<i>Staphylococcus spp.</i> , <i>Streptococcus spp.</i>
	Vert		
	Rouge		

Erythromycine	Interprétation	Animaux	Germes
	Vert	Tous	<i>Staphylococcus spp.</i> , <i>Streptococcus spp.</i>
	Jaune		
	Rouge		

AMC	Interprétation	Animaux	Germes
	Vert	Tous	<i>Enterobacteriaceae</i> , <i>Pasteurella spp.</i>
	Rouge		

Ampicilline	Interprétation	Animaux	Germes
	Vert	Tous	<i>Streptococcus spp.</i>
	Rouge		

Oxacilline	Interprétation	Animaux	Germes
	Vert	Tous	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus spp.</i>
	Jaune		
	Rouge		

Code couleur

Traitement de l'infection selon la posologie recommandée
Traitement de l'infection avec adaptation du dosage antibiotique
Forte probabilité d'échec thérapeutique quelque soit la dose d'antibiotique (ou analyse complémentaires nécessaires)